

Тест на беременность

Клиаблю (Clearblue)

- Точность свыше 99 % со дня ожидаемого начала менструации.
- **Внимательно прочтите данный листок-вкладыш перед проведением теста.**

1 Выполните тест

Со дня ожидаемого начала менструации тест можно проводить в любое время дня.

- Когда вы будете готовы к тестированию, извлеките тест из обертки из фольги и снимите синий колпачок. Сразу же используйте тест.



Тестирование в моче

Проводить тест можно непосредственно под струей мочи либо в пробе мочи, собранной в чистую, сухую емкость.

- Удерживайте тест, направив окрашивающийся наконечник вниз, под струей мочи **или** в собранном образце мочи, как это показано на рисунке, **всего 5 секунд**.
- Окрашивающийся наконечник сразу поменяет цвет на розовый, указывая на впитывание мочи. **Продолжайте держать окрашивающийся наконечник под струей мочи ровно 5 секунд**.
- Держите окрашивающийся наконечник направленным вниз или положите его на горизонтальную поверхность, пока в контрольном окошке не появится голубая линия и результат.

Наденьте колпачок обратно.

Если окрашивающийся наконечник не окрасился полностью в розовый цвет, см. вопрос 5.



2 Подождите 2 минуты

- Голубая линия в контрольном окошке указывает на то, что тест сработал.
- По истечении 2 минут вы можете считать свой результат.
- **Не считывайте результат до появления этой голубой линии.**
- Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение **10 минут** после проведения теста, то тест не сработал (см. вопрос 6).



3 Считайте результаты теста

Теперь вы можете считать свой результат, отображенный в окошке с результатом.



Не имеет значения, если одна из линий, которые составляют знак «+», светлее или темнее другой. Результат — «Беременна».



Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, см. вопрос 7 для получения подробной информации.

ВАЖНО! Считайте результат теста в течение **2–10 минут** после проведения теста.

Не принимайте во внимание никакое изменение результата теста по истечении этого времени.



Вопросы и ответы

- 1. Насколько точен результат теста Clearblue?**
При проведении лабораторных анализов этот тест обеспечивает точность выше 99 % при условии использования со дня ожидаемого начала менструации.
- 2. Каков принцип работы теста Clearblue?**
Когда вы беременны, ваш организм вырабатывает гормон беременности ХГЧ (хорионический гонадотропный гормон человека). На ранних сроках беременности количество ХГЧ в организме увеличивается. Этот тест может определить даже незначительное количество этого гормона в моче со дня ожидаемого начала менструации (чувствительность этого теста составляет 25 мМЕ/мл).
- 3. Когда можно проводить тестирование с помощью теста на беременность Клябл (Clearblue)?**
Со дня ожидаемого начала менструации тест можно проводить в любое время дня. Чтобы определить день ожидаемого начала менструации, рассчитайте свою обычную продолжительность цикла, считая количество дней с первого дня месячных до дня, после которого должны начаться следующие месячные.
- Если цикл нерегулярный, необходимо учитывать наиболее продолжительный цикл за последние месяцы.
 - Не пейте много жидкости перед проведением теста.
 - Если получен результат «Не беременна», но вы считаете, что можете быть беременны, см. вопрос 10.
- 4. Могут ли какие-либо лекарственные препараты или состояние здоровья повлиять на результат?**
- **Перед** проведением теста всегда читайте инструкции производителей всех принимаемых вами лекарств.
 - Лекарства для повышения фертильности, содержащие гормон ХГЧ, могут привести к результату, вводящему в заблуждение (такие препараты для лечения бесплодия вводятся, как правило, в виде инъекций, и тестирование в течение небольшого периода времени после инъекции может привести к ложному результату «Беременна»).
 - Другие препараты для повышения фертильности (например, кломифена цитрат), обезболоживающие препараты и гормональные контрацептивы (например, противозачаточные таблетки) не должны влиять на результат.
 - Если вы недавно прекратили использовать гормональную контрацепцию, или принимаете такие лекарственные средства для лечения бесплодия, как кломифена цитрат, ваш менструальный цикл может быть нерегулярным, что может привести к преждевременному выполнению теста.
 - Если вы недавно были беременны (даже если беременность завершилась раньше срока), может быть получен ложный результат «Беременна».
 - Внематочная беременность, кисты яичников, менопауза и некоторые редкие заболевания могут привести к результату, вводящему в заблуждение.
 - Если получен результат «Беременна», впоследствии вы можете обнаружить, что не беременны, поскольку беременность может естественным способом прерваться на ранних стадиях.
- В случае получения неожиданного результата следует обратиться к врачу.

- 5. Я использовала тест на беременность, но окрашивающийся наконечник не окрасился в розовый цвет полностью. Что мне делать?**

Если окрашивающийся наконечник не стал полностью розовым, то, вероятно, вы использовали недостаточное количество мочи. Тем не менее, если в течение 10 минут после проведения теста в контрольном окошке появилась голубая линия, то тест сработал. Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, см. вопрос 6.

- 6. Я использовала голубую тест, но в контрольном окошке не появилась голубая линия. Что мне делать?**

Если голубая линия не появилась в контрольном окошке в течение 10 минут после проведения теста, то тест не сработал. К этому могут привести следующие причины:

- Окрашивающийся наконечник не был направлен вниз, либо тест не был расположен горизонтально после попадания на него мочи. Используйте слишком мало или слишком много мочи.
- Отбор пробы должен длиться 5 секунд.

Необходимо провести повторное тестирование, используя новый тест и внимательно следуя инструкциям. Соберите образец мочи в чистую, сухую емкость и погрузите туда только окрашивающийся наконечник всего на 5 секунд.

- 7. Что делать, если я не уверена в своем результате?**

Результат «Беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «+», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения теста. Знак «+» в окошке с результатом может выглядеть по-разному, однако линии, составляющие знак «+», и линия в окошке контроля должны иметь одинаковую ширину (см. рисунки А–С).

Рисунок А

У беременных женщин такой результат возможен при проведении тестирования через несколько дней после дня ожидаемого начала менструации, т. е. при более высоком уровне ХГЧ.

Рисунок В

У беременных женщин такой результат не редкость при проведении тестирования непосредственно в день или примерно в день ожидаемого начала менструации, когда уровень ХГЧ остается относительно низким.

Рисунок С

Это все равно указывает на результат «Беременна».

Если вы по-прежнему не уверены в своем результате, проведите повторный тест не ранее чем через 3 дня, внимательно следуя инструкциям.

- Результат «Не беременна» подтверждается наличием голубой линии в контрольном окошке и знаком «-», появившимся в окошке с результатом в течение 10 минут с момента проведения тестирования. Если ваш результат — «Не беременна», но вы считаете, что можете быть беременны, см. вопрос 10.

- 8. Как долго будет отображаться результат теста?**

Результат можно считать в любое время в течение 10 минут после проведения теста. Не обращайте внимания на изменение результата, произошедшее через 10 минут.

- 9. Результат моего теста — «Беременна». Что мне делать?**

Если ваш результат — «Беременна», следует обратиться к врачу для консультации по поводу дальнейших действий.

- 10. Результат моего теста — «Не беременна». Что мне делать?**

Вы можете быть не беременны, или уровень гормона беременности еще недостаточно высок для обнаружения. Вы также могли неверно рассчитать день ожидаемого начала менструации. В случае задержки менструации проведите повторный тест через 3 дня, если вы считаете, что можете быть беременны. Если при повторном тестировании получен результат «Не беременна», но менструации по-прежнему нет, обратитесь к врачу.

www.clearblue.com

Уполномоченный представитель изготовителя: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибуторская Компания» РФ, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2. Телефон 8 800 333 5198

Импортер: ИООО «АЛТИДИ-Вест», 220140, г. Минск, ул. Думбровская, 9, оф. 7.3.1

Производитель: ЭсЛиди Савс Пресижн Даиянгоу ГИМБ (SPD), 47 Рут де Ст.-Жорж, 1213 Петит Лонси, Женева, Швейцария.

Произведено на: Алер (Шанхай) Диагностика Ко., Лтд, Шанхай 201203, Китай.

Улаковщик: Сонок Полад — Пекеджинг Сервисес СП. ЗО. О, 95-010, Стрыков, Польша.

Clearblue — торговая марка SPD. © SPD, 2018. Все права защищены.

	Производитель		Не использовать повторно
	Код партии		Медицинское устройство для диагностики <i>in vitro</i>
	Срок годности		Предельно допустимая температура 2–30 °С

Для самотестирования дома.

Только для диагностического использования *in vitro*.

Не для внутреннего пользования.

Не используйте повторно.

Храните в местах, недоступных для детей.

Хранить при температуре от 2 до 30 °С.

В случае хранения в холодильнике, довести до комнатной температуры в течение 30 минут до начала тестирования.

Не используйте в случае повреждения обертки из фольги.

Не используйте после истечения срока годности.

Утилизируйте вместе с бытовыми отходами.

Не стерильно

